



PortaMare® GmbH

Kesselbodenstraße 11
D-85391 Allershausen

Tel.: +49 (0)89 89 4222 – 999
Fax: +49 (0)89 89 4222 – 998

Web: www.portamare.de
E-mail: info@portamare.de



Testen auch Sie PortaMare®

Testen auch Sie die Sole-Raum- inhalation von PortaMare®!

Für nur 99,00 € erhalten Sie ein kostenloses Leihgerät
inklusive eines 3 Monatspakets der PortaMarin®-
Inhaliersole.*

Sollte Sie unser System nicht überzeugt haben, senden
Sie uns das Gerät einfach zurück.

Falls Sie an unserem Testpaket Interesse haben,
zögern Sie bitte nicht und rufen Sie uns unter unserer
Servicenummer + 49 (0)89 89 4222 – 999 an.
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie gerne.

*Dieses Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht!



PM0001-DOCX026_V01.2 - Schnellleinstieg PortaSan Vitalbox Bambini V3

Sole-Rauminhalation ohne Hilfsmittel und Maske


Kurzanleitung



PortaSan® Vitalbox Bambini V3

PORTAMARE

Aufbau

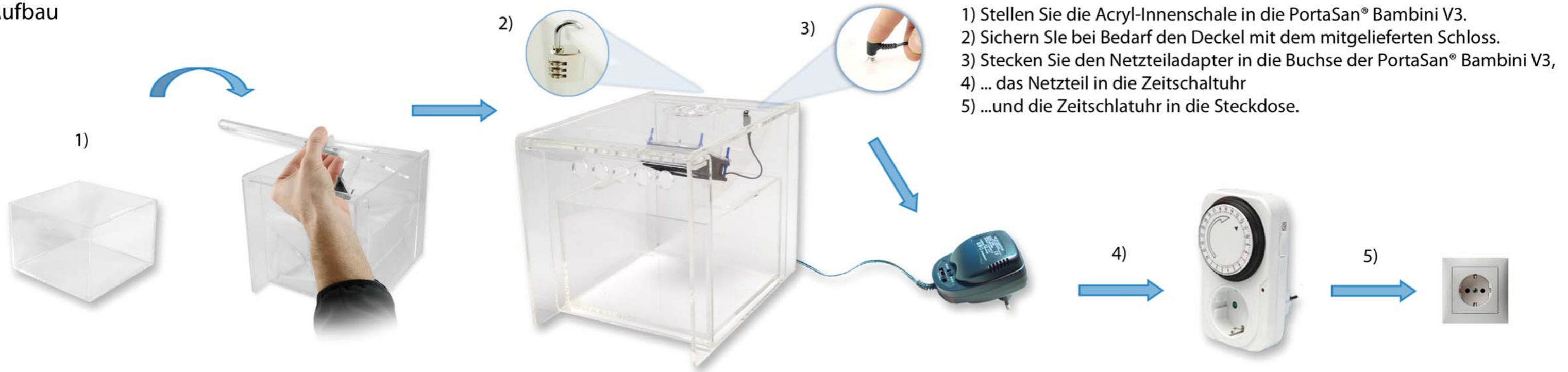

Luftstrom

Einstellung des Raumklimas:
Das Raumklima kann über den Luftstrom (Lüftergeschwindigkeit) und/oder über die Zeitschaltung (Laufzeit des Gerätes) eingestellt werden.



Netzteil

Mittels des vorderen unteren Schiebereglers am Netzteil die gewünschte Volt-Anzahl einstellen (12V = höchste und 6V = niedrigste Lüftergeschwindigkeit).



Achten Sie bitte darauf, dass der obere Regler am Netzteil für die Polarität auf diesem Symbol steht:



(Pluspol = Innenleiter, Masse = Außenleiter)



Zeitschaltung



Zeiteinstellung: Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn bis der kleine schwarze Pfeil auf der aktuellen Uhrzeit steht. Teilstriche entsprechen 15 min.



Ein-/Ausschaltzeit einstellen: Durch Herunterdrücken der Stifte wird das Gerät zu den angegebenen Zeiten eingeschaltet.



Manuelles Einschalten: An der Seite befindet sich ein Schiebeschalter zum direkten Ein- und Ausschalten (I=Dauerbetrieb, ⏰=Zeitschaltung).

Ein-/Nachfüllen



Öffnen Sie die Flasche und füllen Sie die PortaMarin®-Inhaliersole bis zur 1,5 Liter Markierungslinie in der Acrylschale.



Bereits nach wenigen Tagen können Sie eine Auskristallisierung der Sole erkennen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche durch die Salzkristalle nicht komplett verschlossen wird (Salzkruste).

Reinigen


Die entstehenden Salzkristalle an den Innenseiten der Acrylschale bitte regelmäßig entfernen, um zu vermeiden, dass durch die Kapillarwirkung des Salzes die Solelösung aus dem Gerät treten kann. Wir empfehlen dies mind. alle 5 Tage zu kontrollieren.



Reinigungstipp: Acrylschale mit Wasser (lauwarm) füllen. Die Auskristallisierungen lassen sich nun sehr leicht lösen.

Raumposition

Standort Beispiele

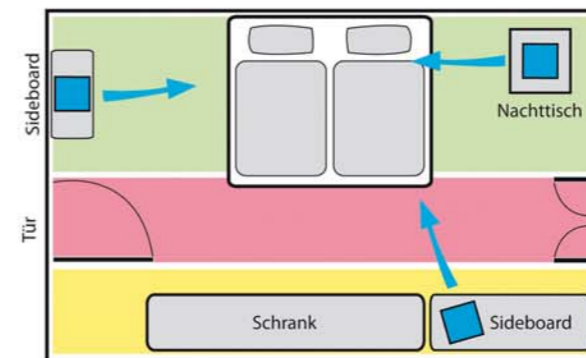


- idealer Standort
- geeigneter Standort
- nicht geeigneter Standort
- PortaMare®Gerät
- Luftstrom


Das Gerät sollte nicht in folgenden Bereichen aufgestellt werden:

- direkt am Fenster,
- direkt neben dem Kopfbereich,
- Durchzugsbereich (rot).

Aufstellhöhe des Gerätes

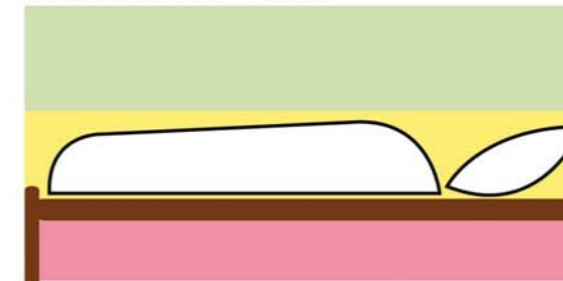

- geeignete Aufstellhöhe des Gerätes
- ideale Aufstellhöhe des Gerätes
- absolut nicht geeignete Aufstellhöhe des Gerätes

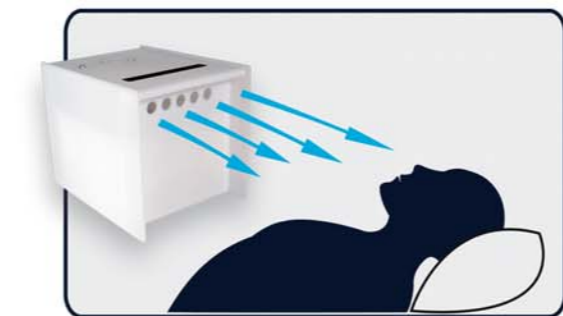

Achten sie darauf, dass das Gerät mit Strömungsrichtung zum Anwender aufgestellt wird.